



Arthroscopy Irrigation

TUBE

Arthroscopy Irrigation Tube

This device minimally invasive surgery by Arthroscope for joint lavage.

Instruction for use

1. Use aseptic technique , Carefully remove tubing set from the package and pass in onto the sterile field.
 - 2-close the clamps.
 - 3- Remove protective caps from perforators and insert into fluids containers.
 - 4- Suspend containers.
 - 5- To prime line: Release the clamps , Untill air is expelled.
 - 6-Close the clamps.
 - 7- Connect the patient end of tube to the Arthroscope or cannula to begin irrigation of the joint.
- * double packed

Warning

- Do not use if package is opened or damaged.
- The tube is a single use item and is shipped sterile. Do not resterilize or reuse.
- Store in a cool dry place.
- Discard after use.
- *Destroy after use.

Warning : If you re-use it will ben microbe pollution danger.



MADE IN IRAN

لوله شستشوی آرتروسکوپی



کاربرد محصول

این محصول در اعمال جراحی کم تهاجمی با آرتروسکوپ جهت شستشوی مفاصل مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای مصرف :

- ۱- بسته بندی را با دقت و به روش استریل باز کرده ، لوله را خارج کنید و در محل استریل قرار دهید.
 - ۲- کلمپ ها را ببندید .
 - ۳- پروتکتور اسپایکها را برداشته و آنها را درمحفظه محلول وارد کنید.
 - ۴- محفظه محلول را آویزان کنید.
 - ۵- کلمپها را باز کنید تا محلول وارد لوله شده و لوله هواگیری شود
 - ۶- کلمپ ها را ببندید.
 - ۷- کانکتور انتهایی لوله را به آرتروسکوپ با کانولا متصل کنید ، لوله آماده ایریگیشن مفصل می باشد.
- * بسته بندی بصورت دو پکه باشد .

هشدار :

- *در صورت صدمه یا باز شدن بسته بندی استفاده نشود.
- *استریل شده و یکبار مصرف می باشد از استریل مجدد اجتناب کنید.
- *در جای خشک و خنک نگهداری شود.
- *پس از مصرف از بین برده شود.
- *هشدار: در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد.

Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES

MANUFACTURE SITE: 8 km of Karaj-Qazvin

High way, Karaj, Iran.

Postal code: 3365166141

TEL (Customer Services) : + 98 21 44422991

TEL (Central Office) : + 98 21 44422283

TEL (Sales Department) : + 98 21 44469017

Fax: + 98 21 44401430

E-mail : info @supamedical.com

258-S5-212/3