



T- Tube

Application

During liver or gallbladder surgeries, the surgeon may find it necessary to place a small tube (called T-Tube) into the bile duct.

The T-Tube allows bile to drain out of the patient's body into a small pouch, known as a bile bag. The amount of bile can then be measured.

If a T-Tube is put in place, it may remain attached to a bile bag for a week or possibly longer. When the bile bag is removed the T-Tube should be tied or capped. It will remain in place for several days so that it can be used for special testing.

The T-Tube is attached to the skin with a stitch. The dressing around the tube should be changed at least once daily, and more often if it becomes moist. The nurse will show the patient how to change the dressing without pulling out the T-Tube.

***Do not use if package is damaged.**

***Destroy after use.**

Warning : If you re-use it will be in microbe pollution danger.



MADE IN IRAN



T تیوب



T تیوب محصولی است که برای خارج کردن صفرا از بدن بیمار در جراحیهای مختلف کبد و کیسه صفرا از جمله پیوند کبد ، سنگ کیسه صفرا و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

T تیوب برای خارج کردن صفرا از بدن ، درون مجرای صفرا (BILE DUCT) گذاشته میشود . صفرا از طریق T تیوب از بدن بیمار خارج میشود . در خارج بدن T تیوب به یک کیسه کوچک بنام BILE BAG متصل میشود. صفرا در این کیسه جمع میشود و بدین ترتیب مقدار آن قابل اندازه گیری است .

ممکن است پس از یک هفته یا بیشتر BILE BAG بر داشته شود . در این هنگام می بایست محل اتصال T تیوب به BILE BAG مسدود شود . T تیوب مدتها در بدن باقی می ماند و میتوان برای آزمایشهای تخصصی نیز از آن استفاده کرد.

T تیوب با بخیه زدن به پوست بیمار ثابت میشود . پانسمان اطراف تیوب با پد حداقل روزی یکبار و در صورت مرطوب شدن بیش از یکبار تعویض شود . پرستار بخش می بایست نحوه تعویض پانسمان (بدون آنکه T تیوب به بیرون کشیده شود) رابه بیمار آموزش دهد .

*در صورت آسیب دیدن بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد .

*پس از مصرف از بین برده شود.

هشدار: در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد.

Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES

Manufacture Site: 8th km of Karaj-Qazvin

High way, Karaj, Iran.

Postal code: 3365166141

TEL (CUSTOMER SERVICES) : + 98 21 44422991

TEL (Sales Department) : + 98 21 44469017

TEL (Central office) : + 98 21 44422283

Fax : + 98 21 44401430

E-mail : info@supamedical.com

258-S5-090/15