

کاربرد :

این محصول به منظور شناسایی و ردیابی بیماران بستری و افرادی که در بیمارستانها ، مراکز درمانی ، آسایشگاهها یا مراکز نگهداری تحت مراقبت میباشند مورد استفاده قرار میگیرد .

ویژگی ها :

دستبند شناسایی بیمار یک نوار مخصوص از جنس پلی اتیلن نرم میباشد که با ویژگیهایی چون انعطاف پذیری ، سبکی ، مقاوم بودن و خاصیت هیپوالرژیک به راحتی روی مچ دست بیمار متصل و تا مدت طولانی ماندگاری دارد . مواد به کار رفته در تولید این محصول ، نگارش بر روی آن را به سادگی امکانپذیر نموده و به راحتی قابل امحا نمیشاند . چسب به کار رفته در این دستبند به گونه ای است که پس از چسبیدن بسادگی قابل جداسازی نیست .

دستورالعمل استفاده از محصول

- ۱- محصول را از بسته بندی خارج کرده و روی یک سطح صاف قرار دهید .
- ۲- مشخصات مورد نیاز بیمار را روی آن با روان نویس ضد آب درج نمائید . دقت کنید که در صورت خطا در درج مشخصات از یک دستبند دیگر استفاده شود چون خطا قابل اصلاح نمی باشد .
- ۳- کاغذ محافظ چسب را بدون اینکه از چسب جدا شود در جهت مخالف تا بزنید .
- ۴- دستبند شناسایی را روی مچ دست بیمار به شکلی که بیمار احساس راحتی کند اندازه کرده ، به کمک دو انگشت شست و اشاره محل تاخوردگی کاغذ محافظ را نگهدارید و کاغذ محافظ را از بین دو انگشت مذکور بیرون بکشید .
- ۵- به بیمار و همراهان متذکر شوید خودسرانه دستبند را باز نکنند .

MADE IN IRAN



Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES
 Manufacture Site: 8th km of Karaj-Qazvin
 High way, Karaj, Iran.
 Postal code: 3365166141
 TEL(CUSTOMER SERVICES) : +98 21 44422991
 TEL (Central office) : + 98 21 44422283
 Fax : + 98 21 44401430
 E-mail : info@supamedical.com

258-S5-183/3