



کاربرد

این محصول به منظور شستشوی خنک کنندگی موضع جراحی با انتقال سرم یا محلول شستشو از محفظه به هند پیس جراحی از طریق عبور از میکروموتور XT-SURGIC (ساخت NSK ژاپن) در اتاقهای عمل بیمارستانی و کلینیکهای دندانپزشکی کاربرد دارد.

راهنمای مصرف

۱. پس از بازکردن بسته بندی ، پروتکتور اسپایک را برداشته و اسپایک را وارد محفظه سرم یا محلول شستشو نمایید .
۲. با باز کردن کلمپ و جاری ساختن سرم لوله شستشو را هواگیری نموده و کلمپ را ببندید .
۳. قطعه دور پمپ لوله شستشو را در محل مخصوص میکروموتور قرار داده و انتهای لوله را به نازل هندپیس جراحی متصل نمایید .
۴. کلمپ را باز کرده ، میکروموتور را روشن نمایید و موضع جراحی را شستشو دهید .

* توسط پزشک و کادر درمانی استفاده شود .

* در صورت آسیب دیدن بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد .

* پس از مصرف از بین برده شود .

هشدار: در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد.



Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES
 MANUFACTURE SITE: 8 th km of Karaj-Qazvin
 High way, Karaj, Iran.
 Postal code : 3365166141
 TEL (CUSTOMER SERVICES) : +98 21 44422991
 TEL (Central office) : +98 21 44422283
 TEL (Sales Department): + 9821 44469017
 Fax: +98 21 44401430
 E-mail : info @supamedical.com 258-S5-175/11