



IRRIGATOR

(WOUND WASHING DEVICE)

Application :

This device is used in operation rooms , emergency wards , different medical centers and in everywhere in which there is need to irrigate wounds and burns with irrigation fluid or infusion solution and also in laboratories to irrigate devices or expel fluids from their containers .

Composition :

This product is composed of one spike , one tube , one connector and two caps .

Instructions for use :

Remove the protector cap over the spike and insert the spike into irrigation fluid . After irrigation , replace the end protector cap over connector to prevent fluid contamination and the fluid can be used up to several times .

Specifications and Advantages :

At present in medical centers for wound irrigation , an I.V.infusion set is used multiple times in different patients with different diseases and also has not protective cap and considering the higher price of I.V. infusion set than the irrigator , this procedure is not desirable from hygienic and economic points of view .

***Do not use if package is damaged.**

***Destroy after use .**

Warning : If you re-use it will be in microbe pollution danger.



MADE IN IRAN



ایریگیتور



یا وسیله شستشوی زخم

کاربرد:

این وسیله در اتاقهای عمل و کلیه بخشهای مراکز درمانی و هر جا که نیاز به شستشوی زخم ، جراحات و سوختگی بیمار با مایع شستشو یا سرم باشد و همچنین در آزمایشگاهها جهت شستشوی وسایل یا خارج کردن مواد مایع از ظروف و درپوش لاستیکی یا پلاستیکی قابل استفاده است .

قطعات:

این محصول دارای یک اسپایک ، یک تیوب و یک کانکتور و دودرپوش می باشد .

شیوه کاربرد :

با برداشتن پروتکتور روی اسپایک و وارد کردن اسپایک در سرم شستشو محصول آماده مصرف است . پس از شستشو با قرار دادن پروتکتور کانکتور انتهایی روی کانکتور می توان مایع از آلودگی مایع شستشو شد و تا انتهای مایع شستشو را به دفعات استفاده نمود .

مزایا و ویژگیها :

در حال حاضر در مراکز درمانی جهت شستشوی زخم از ست سرم ، با بریدن تیوب آن استفاده می شود که هم به جهت قیمت بالای ست سرم نسبت به ایریگیتور و هم از آنجا که ست سرم پرریزه شده به دفعات زیاد و در بیماران متعدد با بیماریهای متفاوت استفاده می شود (و پروتکتور پوششی نسبی ندارد) نه از نظر بهداشتی و نه از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد .

* در صورت آسیب بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد .

* پس از مصرف از بین برده شود.

هشدار: در صورت استفاده مجدد خطر آلودگی میکروبی وجود دارد.

Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES

Manufacture Site: 8th km of Karaj-Qazvin

High way, Karaj, Iran.

Postal code: 3365166141

TEL (CUSTOMER SERVICES) : +98 21 44422991

TEL (Central office) : + 98 21 44422283

TEL (Sales Department) : +98 2144469017

Fax : + 98 21 44401430

258-S5-124/17

E-mail : info@supamedical.com