

ماسک و لوله رابط اکسیژن



با کیسه رزرو

راهنمای مصرف :

- ۱- در ابتدا می بایست لوله اکسیژن به منبع اکسیژن متصل گردد و قبل از استفاده ماسک برای بیمار ، اکسیژن باز گردد.
 - ۲- ماسک طوری روی صورت بیمار قرارگیرد که هم بینی و هم دهان را پوشش دهد.
 - ۳- کش دور سر بیمار قرارگیرد.
 - ۴- نگهدارنده فلزی بینی روی صورت محکم گردد.
 - ۵- کیسه‌ی متصل به ماسک (رزرو بگ) دارای شیر یکطرفه مخصوص است و در صد اکسیژن بالاتری را به بیمار میرساند.
- * در صورت آسیب بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد.
- * پس از مصرف از بین برده شود .
- * این وسیله یکبار مصرف می باشد.



Manufacturer : SUPA MEDICAL DEVICES

MANUFACTURE SITE: 8 th km of Karaj-Qazvin

High way, Karaj, Iran.

MADE IN IRAN

Postal code: 3365166141

TEL (CUSTOMER SERVICES): + 98 21 44422991

TEL (Central Office): + 98 21 4442283

TEL (Sales Department): + 98 21 44469017

FAX: + 98 21 44401430

258-S5-224/3

E-mail: info@supamedical.com